

“大田のまち工場発”

車輪付き担架

災害時における“搬送”を支援
救護所まで**楽に搬送**できます！
4輪、ブレーキ、ストッパー仕様
使い勝手バツグン！

区内中小企業が地域の意見を反映した 現場目線の製品

- ・ 4輪仕様のため2人で搬送可能
(補助者用のサイドバー付)
- ・ 安心のノーパンクタイヤ
- ・ 使いやすい高さ設計
(寝台は移乗しやすく、ハンドルは押し易い)
- ・ 台車は折りたたみ式
- ・ 3分以内で搬送まで実現



疲れたら
ストッパーで
交代可能



のぼり坂も

ブレーキを
使ってゆっくり



くだり坂も

スイスイ運べる
踏切も実証済



もちろん平地も

使い方（3分以内で搬送まで実現）



①担架と台車（付属品）を搬出します。
【付属品】

- ・ハンドル（引手側）
- ・サイドバー
- ・マジックテープ


②ストッパーでタイヤを固定します。



③担架に傷病者を乗せます。

④マジックテープで傷病者と担架を固定します。
（担架背面でテープの位置調整可）

⑤台車を横に広げます。
※ハンドルに引っかからないように注意してください。

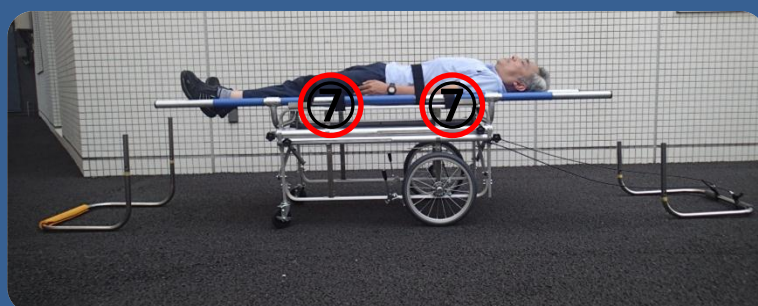

⑥担架を台車にセットします。

⑦マジックテープで
・台車と担架を4か所固定します。



⑧ハンドル棒を固定しているつまみを緩め、両サイドに伸ばします。

⑨ハンドル棒に、ハンドルを差込み、つまみを閉めます。

⑩タイヤのストッパーを解除し、準備ができれば、搬送します。



仕様-8.25時点（若干変更となる場合があります） -
サイズ：2,575×950×670mm（使用時）
※人が乗る部分の高さは600mm

2,220×533×140mm（担架）

1,150×900×492mm（収納時台車）

重量：担架 6kg
台車 16kg